


## MAKEN VAN EEN MALARIA DIKDRUPPEL PREPARAAT

### Identificatie van de glaasjes

Noteer op de matte rand van Het draagglaasje zorgvuldig de naam van de patiënt met potlood of onuitwisbare inkt. Gebruik steeds ontvette glaasjes voor het maken van een dikdruppel preparaat en raak enkel de boorden van het glaasje aan.

### Staalname en aanmaak van dikdruppel preparaat

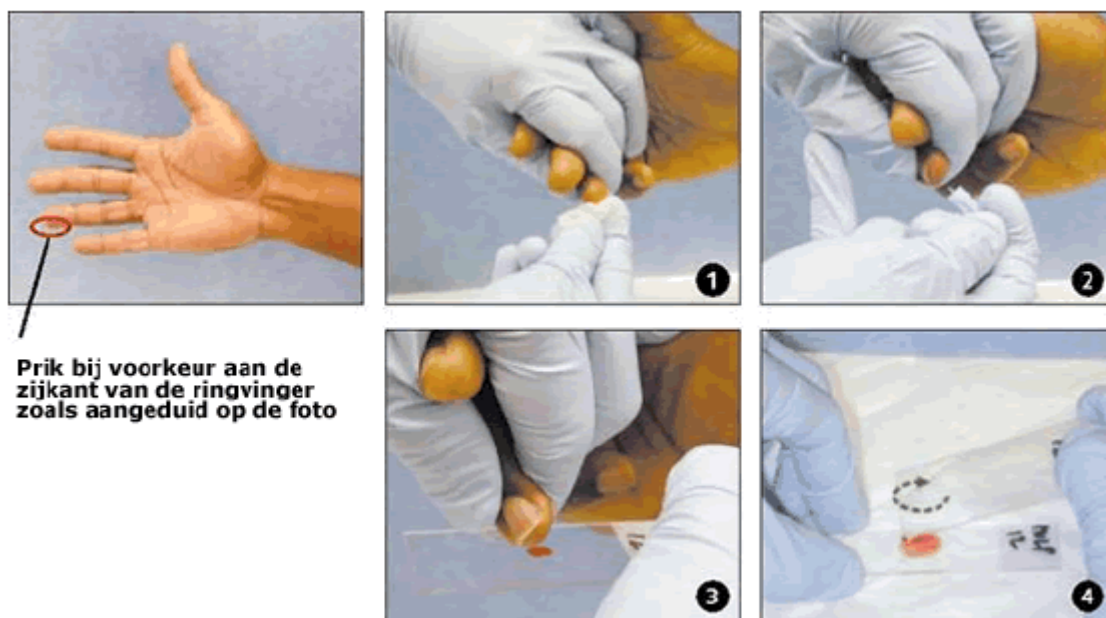

- Draag steeds handschoenen. Ontsmet de ringvinger (Bij zeer jonge kinderen kan men de grote teen of de hiel gebruiken).
- Laat de ontsmettingsalcohol opdrogen.
- Prik aan met een steriel lancet.
- Breng 1 grote of 3 kleine druppels bloed in het midden van het draagglaasje.
- Maak met behulp van een hoek van een draagglaasje of een houten stokje een cirkel van ongeveer 1 centimeter diameter door te draaien in cirkelvormige bewegingen. Verwijder het glaasje gebruikt om de cirkel te maken.
- Laat in horizontale stand drogen bij kamertemperatuur en vermijd hierbij dat er stof in het preparaat terecht komt (vb. door af te dekken met een doosje).

Verzend het staal in een houder voor glazen plaatjes en vermeld duidelijk: "DIKDRUPPEL". Gelieve ook steeds een EDTA-tube af te nemen voor het uitvoeren van de sneltest en het maken van eventueel aanvullende uitstrijkjes!